

## **iridina ® bagno oculare 120 мл**

**Иридина глазная ванна-это раствор для промывания глаз с высокими увлажняющими и успокаивающими свойствами.**

Содержит экстракт ромашки (*Matricaria chamomilla L.*), который, благодаря своим тонизирующим и успокаивающим свойствам, идеально подходит для облегчения усталости глаз. Благодаря содержанию экстракта черники (*Vaccinium myrtillus L.*) используется для освежающих и охлаждающих свойств: дает облегчение усталым глазам и действует, как защита слизистой оболочки глаза от атмосферных воздействий и факторов окружающей среды.

Наличие гиалуроновой кислоты, одной из самых гигроскопичных молекул встречающийся в природе, обеспечивает лучшую гидратацию предкорнеальной области, ускоряет и восстанавливает оптимальное физиологическое состояние, обеспечивает гидрофильность эпителия. Борная кислота и РНМВ, сохраняют микробиологические характеристики продукта без изменений в течение 90 дней после использования, делает рН совместимым с тканями глаз и с органическими глазными жидкостями, с которыми они контактируют

Иридина глазная ванна дает облегчение при покраснении, жжении, раздражении и усталости;

из-за длительного воздействия агентов природных и не атмосферных (солнечные лучи, ветер, смог и т.д.);

случайного присутствия в глазу пыли или инородных тел;

усталости от длительного пребывания перед видео;

плавании в море или в бассейне.

Продукт может быть использован временно, чтобы успокоить зуд из-за косметики, хлора, присутствующего в бассейне, сухости глаз.

Инструкция по применению:

- Тщательно вымойте руки. Перед каждым нанесением промойте глаза теплой водой.

- Наполните глазную ванну раствором Иридина на треть ее емкости (рис. 1 в инструкции на итальянском языке) и своевременно закройте флакон, чтобы сохранить свойства раствора.

- Слегка наклоните голову вперед и осторожно прижмите ванну к глазу (рис. 2).

- Поднимите голову, держа глаз открытым, так чтобы получилось хорошее смачивание глаза.

- Медленно качайте головой в сторону не менее 30 секунд (Рис. 3) и высушите глаз ватным тампоном.

- Выбросьте оставшийся раствор в глазу и повторите процедуру для другого глаза с новым раствором.

Придерживайтесь указанной дозировки.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Не наносите продукт при ношении контактных линз, но удалите их и приступайте к процедуре.

Рекомендуется применение не более 2-3 дней, и не более 3-4 раз в день.

После открытия используйте в течение 90 дней. Хранить при температуре от 5° до 30 ° С.

Не используйте после истечения срока действия.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нет никаких установленных противопоказаний, кроме случаев гиперчувствительности или аллергии на какой-либо компонент.

СОСТАВ: EDTA 0.01%, НРМС 0.02%, экстракт черники и ромашки, гиалуроновая кислота, НРМВ 0.0002%, вода.

Производитель: MONTEFARMACO OTC SpA  
Via IV ноябрь, 92 - 20021 Боллате (MI)